


KIT BONE EXPANDER

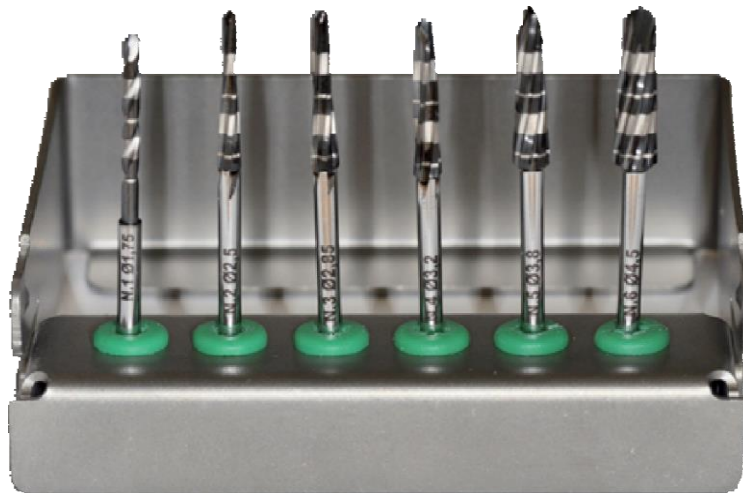

PROTOCOLLO EXPANDER

PROTOCOLLO EXPANDER

Fresa pilota n. 1 in senso orario a circa 800-900 giri per lunghezza di lavoro, dalla fresa n. 2 in poi girare in senso antiorario per lunghezza di lavoro in sequenza fino al diametro desiderato, la velocità ottimale in reverse è di 1100-1200 giri con irrigazione abbondante.



PROTOCOLLO EXPANDER RIALZO CRESTALE

Se per esempio abbiamo 4mm di osso: fresa pilota n. 1 in senso orario 800-900 giri per 4mm poi le frese n. 2 e in 3 in sequenza e in senso antiorario per 4mm con la fresa n. 4 sempre in senso antiorario cominciare delicatamente a forare la corticale del seno, una volta forata la corticale del seno, girare ancora 30 secondi senza approfondire solo per far defluire fisiologica. All'intero del seno per lo scollamento della membrana di Schneider, finire con la fresa del diametro desiderato es. fresa n. 5 per diam. 3,8 o fresa n. 6 per diam. 4,5.
In reverse girare a 1100-1200 giri con irrigazione molto abbondante.



3P ImplaFavourite S.r.l.

Via Botteghe, 31 • SCALENGHE (TO) • Tel. 011 98 66 952 • mobile +39 349 59 67 540
info@3p-impla.it • www.3p-impla.it